



# HYALUAL

— SCIENCE & RESULTS —

Técnicas de inyección Hyalual



## CONTENIDO

---

### REDERMALIZACIÓN BÁSICA

- 03 PROTOCOLO BASADO EN MORFOTIPOS DE ENVEJECIMIENTO
- 04 ROSTRO COMPLETO (TÉCNICA PAPULAR)
- 05 REDERMALIZACIÓN CON CÁNULA

### TÉCNICAS DE REDERMALIZACIÓN PARA DIFERENTES ZONAS

- 06 ÁREA PERIORBITAL
- 07 ÁREA PERIORBITAL: "MÁSCARA VENECIANA"
- 08 ÁREA TEMPORAL
- 09 LABIOS Y ÁREA PERIORAL
- 10 CUELLO Y ESCOTE
- 11 MANOS

### TÉCNICAS DE DRENAJE LINFÁTICO

- 12 TÉCNICA DEL AUTOR POR EL MD. KORYTTSEVA
- 13 TÉCNICA DEL AUTOR POR EL MD. BALITSKAYA

### TÉCNICAS DE ELEVACIÓN

- 14 TÉCNICA BÁSICA DE LIFTING
- 15 TÉCNICA DEL AUTOR POR EL MD. YUSOVA
- 16 EL PRIMER PROCEDIMIENTO DE INYECCIÓN CON ELECTRI
- 17 REDERMALIZACIÓN DE PIELES SENSIBLES CON H&S
- 18 "RED SMART ANTIENVEJECIMIENTO" POR EL MD. CHMIELEWSKI
- 19 PROTOCOLO DE PROCEDIMIENTOS

	Procedimiento I..... 2 semanas	Procedimiento II..... 2 semanas	Procedimiento III
<b>Rostro cansado</b>	Hyalual Light Papular, drenaje linfático 	Hyalual Light o Hyalual Smart Papular 	Hyalual Booster Lineal 
<b>Deformativo</b>	Hyalual Light Papular, drenaje linfático 	Hyalual Light Papular, drenaje linfático 	Hyalual Smart o Hyalual Booster Lineal 
<b>Arrugas</b>	Hyalual Smart Papular, lineal 	Hyalual Smart Papular, lineal 	Hyalual Smart o Hyalual Booster Lineal 
<b>Muscular</b>	Hyalual Light Papular, drenaje linfático 	Hyalual Smart Papular, lineal 	Hyalual Booster Lineal 


Designación:



- Aguja



- Cánula

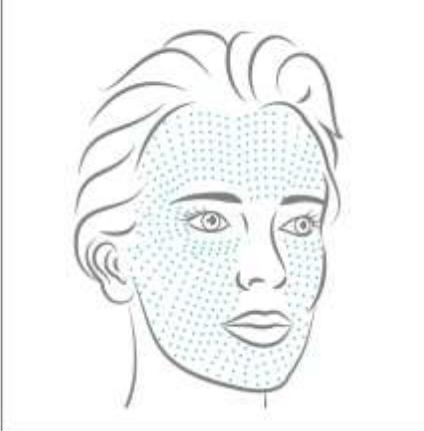Producto	Resultados	Indicaciones	Protocolo
<p>Hyalual Light</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proporciona drenaje linfático</li> <li>• Reduce el edema</li> <li>• Mejora la microcirculación</li> <li>• Desintoxica los tejidos</li> <li>• Aclara la piel de 1 a 2 tonos</li> <li>• Aporta luminosidad a las ojeras</li> <li>• Disminuye los signos de fatiga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Componente edematoso (cansado, deformativo, morfotipos musculares): procedimiento inicial</li> <li>• Piel grasa con poros dilatados</li> <li>• Acné, postacné: procedimiento inicial</li> <li>• Cambios cutáneos cicatriciales de cualquier etiología</li> <li>• Coadministración con toxina botulínica, lifting de hilos, rellenos</li> <li>• Preparación para procedimientos traumáticos</li> </ul>	<p><b>Productos:</b> Hyalual Light / Smart / Booster</p> <p><b>Técnica:</b> Papular, intradérmica</p> <p><b>Diámetro de la pápula facial:</b> 1-3 mm</p> <p><b>Volumen del producto:</b> no más de 0,03 ml en cada punto de inyección</p> <p><b>Distancia entre pápulas:</b> 5 mm</p>
<p>Hyalual Smart</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Restablece el equilibrio hídrico de la piel</li> <li>• Reafirma restaurando la estructura del colágeno dérmico</li> <li>• Reduce la pigmentación y aclara la piel</li> <li>• Aplana el microrrelieve cutáneo</li> <li>• Mejora la apariencia de las arrugas</li> <li>• Favorece la luminosidad de la tez</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Morfotipo arrugado: procedimiento inicial</li> <li>• Componente edematoso (cansancio, deformaciones, morfotipos musculares): 2º procedimiento</li> <li>• Piel seca y deshidratada</li> <li>• Corrección del fotoenvejecimiento, fotodaño, discromias</li> <li>• Preparación para procedimientos traumáticos</li> </ul>	<p>En el área periorbitaria las pápulas deben ser aún más pequeñas y superficiales; distancia de 2-5 mm. No se utiliza Hyalual Booster</p> <p><b>Cantidad total de producto:</b> 2 ml</p> <p><b>Curso:</b> 3 procedimientos con 2 semanas de intervalo</p>
<p>Hyalual Booster</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proporciona un efecto lifting</li> <li>• Mejora la calidad de la piel aportándole firmeza</li> <li>• Reduce la profundidad de las arrugas</li> <li>• Mejora la coloración bermellón</li> <li>• Restablece el equilibrio hídrico dérmico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Corrección de cicatrices faciales picadas</li> <li>• Preparación para procedimientos traumáticos</li> <li>• Procedimientos 3º y 4º en protocolo de Redermalización</li> </ul>	<p><b>Régimen de aplicación</b></p> 

Producto	Resultados	Indicaciones	Protocolo
<p>Hyalual Smart Hyalual Booster</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Estimula las células madre mesenquimales (MSC) en el tejido adiposo</li> <li>• Repone el volumen facial perdido</li> <li>• Reduce las líneas finas y las arrugas</li> <li>• Hidrata la piel</li> <li>• Proporciona un efecto lifting</li> <li>• Mejora la textura de la piel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Morfotipos de envejecimiento cansado para la corrección de los surcos del tercio medio, lagrimal y malar</li> <li>• Morfotipo de arrugas para la renovación de la grasa subcutánea</li> <li>• Morfotipo muscular para corregir las zonas temporal y media de las mejillas</li> </ul>	<p><b>Productos:</b> Hyalual Smart / Booster</p> <p><b>Técnica:</b> Cánula</p> <p>Cánula utilizada (27 G/50 mm o 25 G/50 mm) 3-4 vectores por un punto de entrada con un volumen de 0,1 ml Distribución subcutánea del producto mediante la técnica funning</p> <p><b>Cantidad total de producto:</b> 2 ml</p> <p><b>Curso:</b> 3 procedimientos con 2 semanas de intervalo</p>



## Régimen de aplicación




Producto	Resultados	Indicaciones	Protocolo
Hyalual Light Hyalual Smart	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aumenta la firmeza y elasticidad de la piel</li> <li>• Elimina las ojeras</li> <li>• Mejora la apariencia de las arrugas</li> <li>• Aporta luminosidad a la piel</li> <li>• Activa la microcirculación</li> <li>• Estimula el drenaje linfático</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Piel seca</li> <li>• Reducción de la elasticidad y la turgencia</li> <li>• Ojeras</li> <li>• Hiperpigmentación en la zona periorbital</li> <li>• Vascularización patológica</li> <li>• Arrugas periorbitarias</li> <li>• Edema</li> </ul>	<p><b>Productos:</b> Hyalual Light / Smart</p> <p>Técnica: <b>Papular</b></p> <p><b>Diámetro de la pápula:</b> 1–2 mm</p> <p><b>Distancia entre pápulas:</b> 2–3 mm</p> <p><b>Cantidad total de producto:</b> 2 ml</p> <p><b>Curso:</b> 3 procedimientos con 2 semanas de intervalo</p>




## Régimen de aplicación

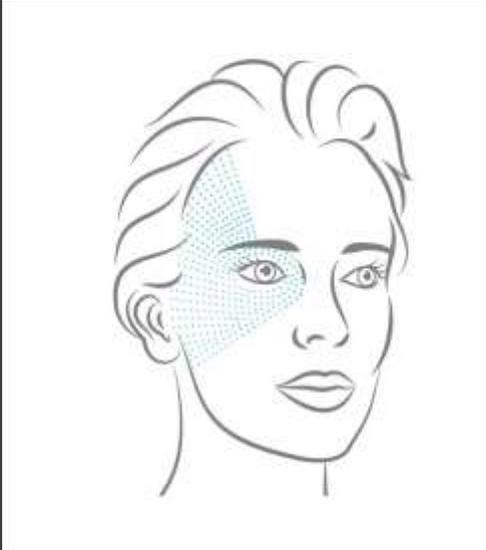

Producto	Resultados	Indicaciones	Protocolo
<p>Hyalual Light</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aumenta la firmeza y elasticidad de la piel</li> <li>• Eleva las cejas y los párpados superiores</li> <li>• Elimina las ojeras</li> <li>• Corrige la hiperpigmentación</li> <li>• Mejora la apariencia de las arrugas</li> <li>• Activa la microcirculación y el drenaje linfático</li> <li>• Proporciona un efecto lifting</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Caída de cejas y párpados superiores</li> <li>• Arrugas finas y patas de gallo</li> <li>• Pérdida de tono de la piel del párpado inferior</li> <li>• Hernia de grasa</li> <li>• Bolsas y surcos malares</li> <li>• Ojeras</li> <li>• Surcos nasolagrimales</li> <li>• Orbital fat atrophy</li> </ul>	<p><b>Productos:</b> Hyalual Light</p> <p>Técnica: <b>Papular</b></p> <p><b>Diámetro de la pápula:</b> 1–2 mm</p> <p><b>Distancia entre pápulas:</b> 2–5 mm</p> <p><b>Cantidad total de producto:</b> 1–2 ml</p> <p><b>Curso:</b> 3 procedimientos con 2 semanas de intervalo</p>
<div style="text-align: center; background-color: black; color: white; padding: 5px; font-weight: bold;">Régimen de aplicación</div> 			




Producto	Resultados	Indicaciones	Protocolo
Hyalual Light Hyalual Smart Hyalual Booster	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mejora de la calidad de la piel incrementando su elasticidad</li> <li>• Combate la pigmentación temporal</li> <li>• Ejerce un efecto lifting y realza la zona temporal, o mejora la calidad de la piel de la zona temporal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Piel fina con laxitud en el área temporal</li> <li>• Hiperpigmentación</li> <li>• Trastornos de la microcirculación</li> <li>• Depresiones de los tejidos blandos</li> <li>• Signos de couperosis</li> </ul>	<p><b>Productos:</b> Hyalual Light / Smart / Booster</p> <p>Técnica: <b>Papular</b></p> <p><b>Diámetro de la pápula:</b> 1–2 mm</p> <p><b>Distancia entre pápulas:</b> 5 mm</p> <p><b>Cantidad total de producto:</b> 1 ml</p> <p><b>Curso:</b> 3 procedimientos con 2 semanas de intervalo</p>

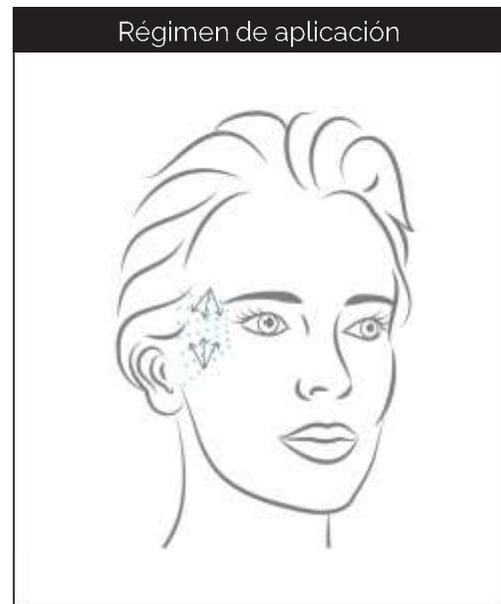


Producto	Resultados	Indicaciones	Protocolo
<p>Hyalual Smart</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reduce las líneas finas y las arrugas</li> <li>• Aumenta la turgencia y elasticidad de la piel</li> <li>• Suaviza la textura de la piel</li> <li>• Hidrata los labios</li> <li>• Previene la aparición del fotoenvejecimiento</li> <li>• Mejora la tez en general y el contorno de los labios</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Surcos nasogenianos y líneas de marioneta</li> <li>• Esquinas de la boca flácidas</li> <li>• Arrugas periorales (arrugas de fumador) y arrugas finas alrededor de los labios</li> <li>• Piel seca</li> <li>• Pigmentación de la zona perioral</li> </ul>	<p><b>Productos:</b> Hyalual Smart / Booster</p> <p><b>Técnicas:</b> Papular, lineal, bolo</p> <p><b>Cantidad total de producto:</b> 1-2 ml</p> <p><b>Curso:</b> 3 procedimientos con 2 semanas de intervalo</p>

Hyalual Booster

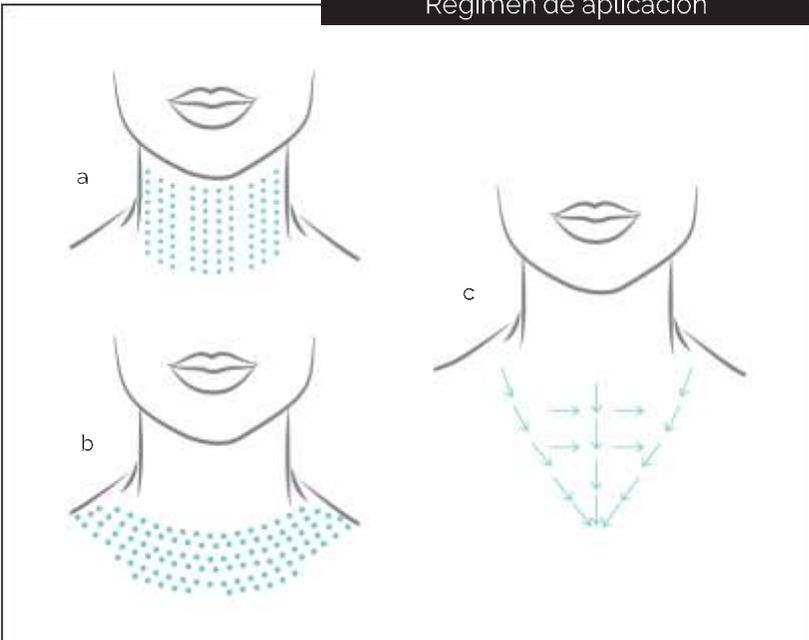


Producto	Resultados	Indicaciones	Protocolo
<p>Hyalual Smart</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hidrata la piel</li> <li>• Proporciona un efecto lifting</li> <li>• Mejora el tono y la elasticidad de la piel</li> <li>• Aclara las manchas oscuras</li> <li>• Fortalece la estructura de la piel</li> <li>• Reduce la aparición de arrugas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disminución del tono y la elasticidad de la piel del cuello y el escote</li> <li>• Líneas finas y arrugas</li> <li>• Piel deshidratada</li> <li>• Hiperpigmentación</li> </ul>	<p><b>Redermalización clásica</b></p> <p><b>Productos:</b> Hyalual Smart / Booster</p> <p><b>Técnica:</b> Papular (a, b)</p> <p><b>Diámetro de la pápula:</b> 3–4 mm</p> <p><b>Distancia entre pápulas:</b> 0.7–1 cm</p> <p><b>Cantidad total de producto:</b> 1–2 ml</p> <p><b>Curso:</b> 3 procedimientos con 2 semanas de intervalo</p>
<p>Hyalual Booster</p> 	<div style="text-align: center; background-color: black; color: white; padding: 5px; font-weight: bold;">Régimen de aplicación</div>  <p>The diagram illustrates three application techniques (a, b, and c) for the neck and décolletage area. Technique (a) shows vertical papular injections. Technique (b) shows horizontal papular injections. Technique (c) shows a combination of vertical and horizontal papular injections, with arrows indicating the direction of the injections.</p>		<p><b>Redermalización combinada</b></p> <p><b>Productos:</b> Hyalual Smart / Booster</p> <p><b>Técnica:</b> Papular (a, b) y lineal (c)</p> <p><b>Diámetro de la pápula:</b> 3–4 mm</p> <p><b>Distancia entre pápulas:</b> 0.7–1 cm</p> <p>En la zona del escote: refuerzo mediante técnica lineal retrógrada (c)</p> <p><b>Cantidad total de producto:</b> 2 ml</p> <p><b>Curso:</b> 3 procedimientos con 2 semanas de intervalo</p>

Producto	Resultados	Indicaciones	Protocolo
Hyalual Smart Hyalual Booster	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hidratación de la piel</li> <li>• Mejora la textura y el relieve cutáneo</li> <li>• Unifica el tono de la piel</li> <li>• Aclara las manchas oscuras</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Piel fina y atrófica</li> <li>• Deshidratación dérmica</li> <li>• Disminución del tono y la elasticidad de la piel de las manos</li> <li>• Hiperpigmentación</li> </ul>	<p><b>Redermalización clásica (a)</b></p> <p><b>Productos:</b> Hyalual Smart</p> <p>Técnica: <b>Papular</b></p> <p><b>Diámetro de la pápula:</b> 3–4 mm</p> <p><b>Distancia entre pápulas:</b> 0,5–1 cm</p> <p><b>Cantidad total de producto:</b> 2 ml</p>

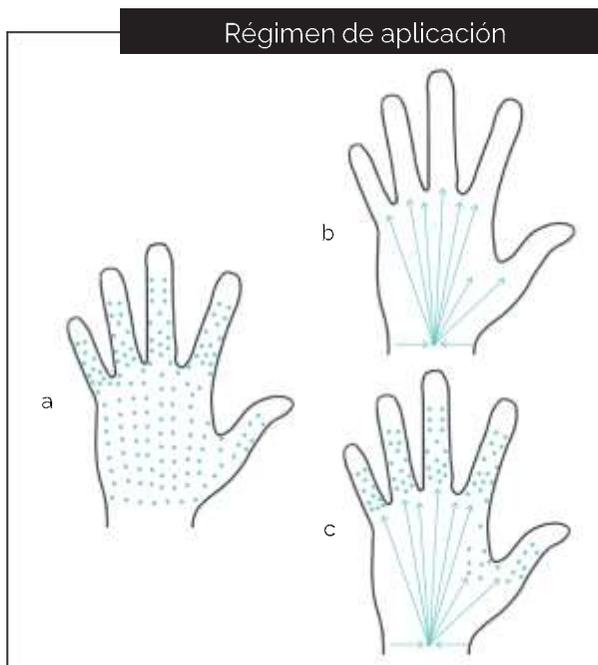


<p><b>Redermalización por técnica vectorial (b)</b></p> <p><b>Productos:</b> Hyalual Smart</p> <p><b>Técnica:</b> Cánula</p> <p>Cánula utilizada (25 G/50 mm) mediante técnica vectorial</p> <p><b>Cantidad total de producto:</b> 1–2 ml</p> <p><b>Curso:</b> 3 procedimientos con 2 semanas de intervalo</p>
<p><b>Redermalización combinada (c)</b></p> <p><b>Productos:</b> Hyalual Smart</p> <p><b>Técnica:</b> Papular y vector con cánula</p> <p><b>Cantidad total de producto:</b> 2 ml</p> <p><b>Curso:</b> 3 procedimientos con 2 semanas de intervalo</p>

Producto	Resultados	Indicaciones	Protocolo
<p>Hyalual Light</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Estimula el eflujo linfático</li> <li>• Reduce el edema, especialmente en el área periorbital</li> <li>• Estimula la microcirculación</li> <li>• Proporciona un cutis radiante</li> <li>• Desintoxica los tejidos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Edema del párpado inferior y/o superior, hernia no expresada</li> <li>• Trastornos de la microcirculación</li> <li>• Tez apagada</li> <li>• Morfotipo de envejecimiento deformativo</li> </ul>	<p><b>Productos:</b> Hyalual Light</p> <p><b>Técnica:</b> Papular, intradérmica</p> <p><b>Diámetro de la pápula:</b> 1–2 mm</p> <p><b>Distancia entre pápulas:</b> 2–3 mm</p> <p><b>Cantidad total de producto:</b> 1–2 ml</p>

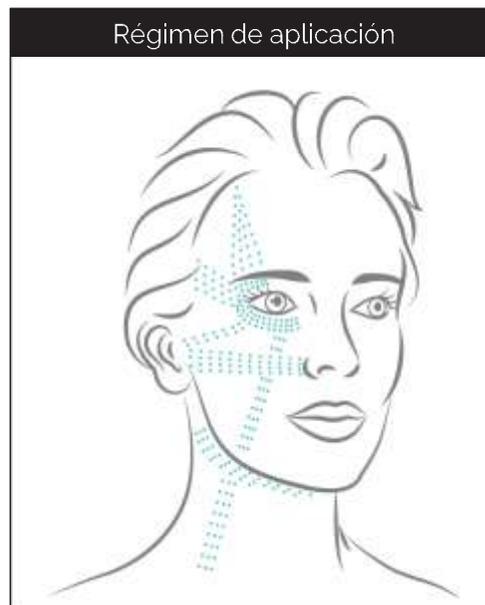

Producto	Resultados	Indicaciones	Protocolo
Hyalual Light	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reduce el edema y estimula el flujo linfático</li> <li>• Mejora el cutis en general</li> <li>• Estimula la microcirculación</li> <li>• Aumenta la turgencia y elasticidad de la piel</li> <li>• Desintoxica los tejidos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Edema del párpado inferior y/o superior, hernia no expresada</li> <li>• Pacientes con componente edematoso</li> <li>• Trastornos de la microcirculación</li> <li>• Tez apagada</li> <li>• Laxitud de la piel</li> <li>• Morfotipo deformativo</li> </ul>	<p><b>Producto:</b> Hyalual Light</p> <p>Técnica: <b>Papular</b></p> <p><b>Diámetro de la pápula:</b> 1–2 mm</p> <p><b>Distancia entre pápulas:</b> 0,5–1 cm</p> <p>Las inyecciones se realizan en la misma dirección del flujo linfático</p> <p><b>Cantidad total de producto:</b> 2 ml</p> <p><b>Curso:</b> 3 procedimientos con 2 semanas de intervalo</p>

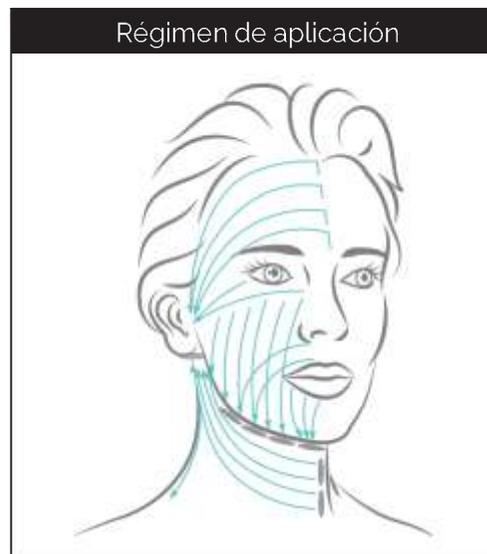


Producto	Resultados	Indicaciones	Protocolo
<p>Hyalual Smart</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Restablece el equilibrio hidrico de la piel</li> <li>• Reafirma reforzando la estructura del colágeno dérmico</li> <li>• Reduce la pigmentación y aclara la piel</li> <li>• Aplana el microrrelieve cutáneo</li> <li>• Mejora el aspecto de las arrugas</li> <li>• Proporciona un cutis radiante</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laxitud y atonía de la piel</li> <li>• Morfotipo de las arrugas</li> <li>• Piel deshidratada</li> <li>• Hiperpigmentación y tono desigual de la piel</li> </ul>	<p><b>Productos:</b> Hyalual Smart / Booster</p> <p><b>Técnica:</b> Inyecciones lineales intradérmicas. Distancia entre líneas de 10-13 mm</p> <p><b>Cantidad total de producto:</b> 2 ml</p> <p><b>Curso:</b> 3 procedimientos con 2 semanas de intervalo</p>

## Hyalual Booster



- Proporciona un efecto lifting
- Mejora la calidad de la piel aportándole firmeza
- Reduce la profundidad de las arrugas
- Restaura el color bermellón
- Corrige el equilibrio hidrico dérmico


### Régimen de aplicación

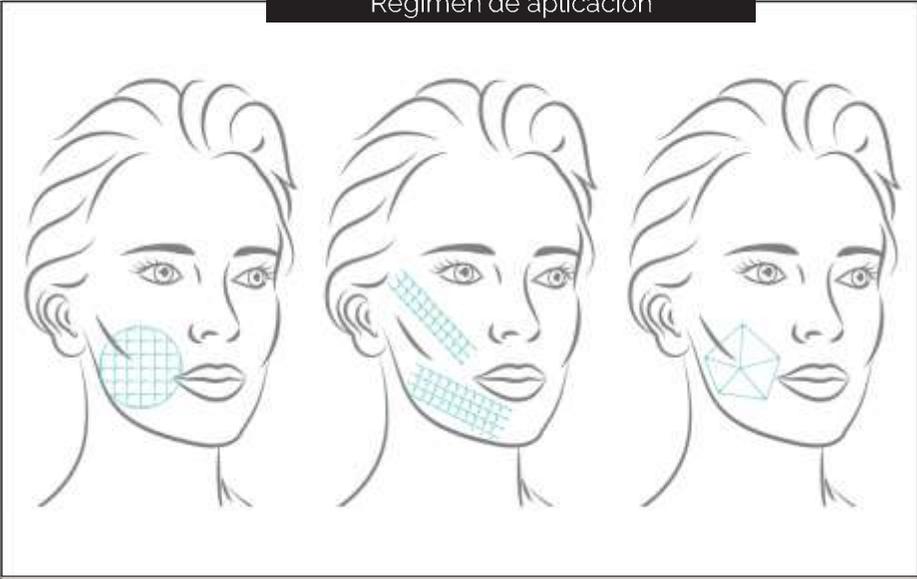

Producto	Resultados	Indicaciones	Protocolo
Hyalual Smart Hyalual Booster	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fortalece la estructura del colágeno</li> <li>Mejora la calidad de la piel y reduce los signos visibles del envejecimiento</li> <li>Mejora el contorno facial</li> <li>Ayuda a mejorar los síntomas de la ptosis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Morfotipo de envejecimiento deformativo</li> <li>Poca elasticidad de la piel</li> <li>Ptosis por gravedad</li> </ul>	<p><b>Producto:</b> Hyalual Smart / Booster</p> <p><b>Técnica:</b> Túnel, lineal corto, a lo largo de las líneas de tensión de la piel</p> <p><b>Cantidad total de producto:</b> 1-2 ml</p> <p><b>Curso:</b> 3 procedimientos con 2 semanas de intervalo</p>



Producto	Resultados	Indicaciones	Protocolo
Electri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aumenta la hidratación de la piel</li> <li>• Mejora el cutis</li> <li>• Normaliza la microcirculación</li> <li>• Mejora la estructura de la piel</li> <li>• Previene los primeros cambios cutáneos relacionados con la edad</li> <li>• Tiene un efecto antioxidante</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Piel deshidratada</li> <li>• Trastornos de la microcirculación</li> <li>• Reducción de la turgencia cutánea</li> <li>• Arrugas superficiales</li> <li>• Hiperpigmentación</li> <li>• Producto ideal para la inyección primaria</li> </ul>	<p><b>Producto:</b> Electri</p> <p><b>Técnica:</b> Papular, intradérmica</p> <p><b>Diámetro de la pápula:</b> 1–3 mm</p> <p><b>Distancia entre pápulas:</b> 0,5–1 cm</p> <p><b>Cantidad total de producto:</b> 1,5 ml</p> <p><b>Curso:</b> 1 procedura</p>

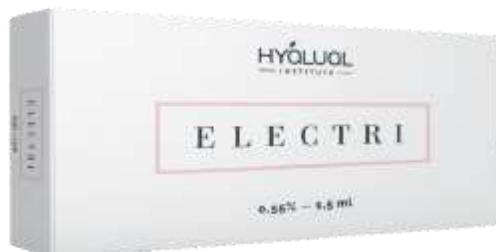

## Régimen de aplicación



Producto	Resultados	Indicaciones	Protocolo
H&S	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Normaliza la microcirculación</li> <li>• Previene el fotoenvejecimiento y el cronoenvejecimiento</li> <li>• Mejora la turgencia, la textura y el tono de la piel</li> <li>• Reduce la profundidad de las arrugas</li> <li>• Restablece el equilibrio hídrico dérmico</li> <li>• Reduce los signos de sensibilidad cutánea</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Piel deshidratada</li> <li>• Trastornos de la microcirculación</li> <li>• Rosácea, acné</li> <li>• Arrugas superficiales</li> <li>• Hiperpigmentación</li> </ul> <p><b>Unido a signos de piel sensible:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Venas superficiales</li> <li>• Bolsas malares</li> <li>• Signos de cuperosis</li> <li>• Piel "apergamada" débil</li> <li>• Picor e hipersensibilidad cutáneos</li> </ul>	<p><b>Producto:</b> H&amp;S 0,9%</p> <p><b>Técnica:</b> Papular, intradérmica</p> <p><b>Diámetro de la pápula:</b> 1–3 mm</p> <p><b>Distancia entre pápulas:</b> 0,5–1 cm</p> <p><b>Cantidad total de producto:</b> 1–5 ml</p> <p><b>Curso:</b> 3 procedimientos con 2 semanas de intervalo</p>

Régimen de aplicación



Producto	Resultados	Indicaciones	Protocolo
Hyalual Light Hyalual Smart Hyalual Booster	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proporciona efectos antioxidantes, nutritivos y antiinflamatorios</li> <li>• Estimula la regeneración celular</li> <li>• Reduce las líneas finas y las arrugas</li> <li>• Hidrata la piel</li> <li>• Proporciona un efecto lifting</li> <li>• Mejora la textura de la piel</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Signos visibles de envejecimiento, como líneas finas y arrugas</li> <li>• Deshidrata la piel</li> <li>• Ideal para pacientes que prefieren un procedimiento menos traumático y sin periodo de recuperación</li> </ul>	<p><b>Producto:</b> Hyalual Light / Smart / Booster</p> <p><b>Técnica:</b> Cánula</p> <p>Cánula utilizada (27 G/50 mm o 25 G/50 mm) 3-4 vectores por punto de entrada con un volumen de 0,1 ml                      Distribución subcutánea del producto mediante la técnica funning</p> <p><b>Cantidad total de producto:</b> 2 ml</p> <p><b>Curso:</b> 3 procedimientos con 2 semanas de intervalo</p>





Inyecciones



Hyalual Light



Hyalual Smart



Hyalual Booster



Electri

H&S



Cuidados posprocedimiento



**Profi Delux**  
Spray sin contacto para después del procedimiento  
150 ml



**Safe SUN**  
SPF 50  
Protección compleja contra el fotoenvejecimiento  
150 ml



Mantenimiento de la piel en el hogar



**Profi Delux**  
Spray sin contacto para después del procedimiento  
50 ml



**Safe SUN**  
SPF 50  
Protección compleja contra el fotoenvejecimiento  
50 ml



**Almohadillas exfoliantes rejuvenecedoras**  
Almohadillas húmedas multiácido para regenerar la piel del rostro  
60 unidades

**Lo últimos en crema para los ojos**  
Crema intensiva correctora para los ojos  
15 ml

**Suero iluminador antiedad en crema**  
Suero antiedad en crema para una piel del rostro joven y radiante  
30 ml

**Suero multivitamínico antioxidante**  
Suero nutritivo con potente protección antioxidante  
30 ml



[www.hyalual.com](http://www.hyalual.com)